

Wenn das Verdampferpfännchen eine Haube kriegt



Pfännchen nach korrekter Verdampfung. Es wird kurz in Wasser abgekühlt, mit 1g Varroxal ad us. vet. gefüllt und der Oxalisator ist wieder einsatzbereit.

Verwenden Sie bitte ausschliesslich das zugelassene Mittel „Varroxal ad us. vet.“ der Firma Andermatt Biovet AG.



Hat das Pfännchen eine Haube aus nicht verdampfter Oxalsäure, ist die Stromquelle zu schwach.

Achten Sie bitte darauf, dass die Batterie jeweils von dem Einsatz gut geladen ist.



Hier wurde die falsche Oxalsäure appliziert! Mit Oxalsäure-Dihydrat ad us. vet. gibt es bei korrekter Anwendung keine Rückstände im Pfännchen.

